

簡単!!
スピード
計測

NEW

ママタッチ

皮膚赤外線体温計

デコ
DECO



軽量
72g

1秒
計測



希望小売価格 ¥8,400(税込)

赤ちゃんの健康のために・・・

ママタッチ DECO で毎日お熱を測りましょう

★ママタッチ DECO(デコ)での計測方法

1. おでこにあてて SCAN ボタンを押して下さい。

2. SCAN ボタンを押しながらおでこの端から端へ移動させて、SCAN ボタンから指を離します。



注意


ピタッと隙間なく当てて下さい！



注意

前髪の~~上~~から

汗・~~水分~~

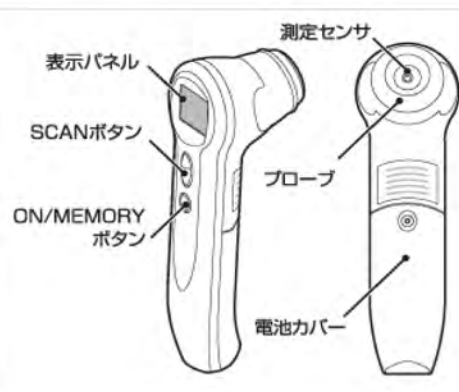

【仕様】

名称
一般の名称
医療機器分類
電源
電撃保護
電池寿命
測定方式
測定部位
表示温度
表示温度範囲
最大許容誤差

使用環境
保管環境
本体重量
外形寸法
付属品

医療機器認証番号
検温履歴記録数

ママタッチ DECO S-701

皮膚赤外線体温計

管理医療機器

リチウム電池 CR2032(DV3.0V)

BF 形装着部

約 5000 回

赤外線式

額

舌下補正温度

23.0℃～44.0℃(最小表示 0.1℃)

±0.2℃(35.0℃～42.0℃)

±0.3℃(35.0℃未満、42.0℃超過)

10℃～40℃、95%RH 以下(結露無きこと)

-20℃～-60℃、95%RH 以下(結露無きこと)

約 72 g(電池含)

長さ 149×幅 44×厚さ 54mm

リチウム電池 CR2032 お試し用(本体装着済)×1 個

予備電池×1 個、取扱説明書(品質保証付)、添付文書

224ALBZX00030000

10

販売店

 あうる⁺medical

株式会社 あうる

〒279-0012

千葉県浦安市入船 3-70 A4-1

TEL: 047-374-3100 FAX: 047-350-3609

http://medical.owlowl.co.jp